

Test Desinfektionsmittel - Materialverträglichkeit

Testmaterial

Materialmuster von den *skai* - Bezugstoffen der Firma Hornschuh AG (Liste Produktbezeichnungen als Anhang). Die Bezugstoffe werden, u.a. bei der Herstellung von medizinischen Möbeln, wie z.B. Untersuchungsliegen, Behandlungsstühle und anderen medizinischen Möbeln, verwendet.

Testprodukte

Getestet wurden die HIBOmed Desinfektionsmittel: *BiguSept fluid*, *EtaSept AF* und *SinAlc sensitiv*. Es handelt sich hierbei um gebrauchsfertige Produkte, wie sie zur Schnelldesinfektion von medizinischen Geräten, Zubehör und Möbeln empfohlen wird.

Testverfahren

Durchgeführt wurde der Test in der Möbelpolsterei MERTENS, 48163 Münster. In einem Zeitraum über 3 Monate wurden die Bezugstoffe mehrmals täglich mit den o.g. Desinfektionsmitteln behandelt. Die Produkte wurden, gemäß der RKI Richtlinien, als Wischdesinfektion aufgebracht. In regelmäßigen Abständen wurde eine Sichtprüfung durchgeführt, um Veränderungen feststellen zu können.

Testergebnis

Nach eingehender, genauer Überprüfung der Testmaterialien konnten keine Veränderungen festgestellt werden, zweckmäßige Bezugstoffe aus Kunstleder können somit unbedenklich desinfiziert werden

Münster, Juli 2014